



取扱説明書

R9-STICK®




1 カムレバーのロックを外す。



2 身長に合わせて目盛りを調節する。



3 カムレバー上部の▼印と目盛の下にある▲印の向きを合わせる。

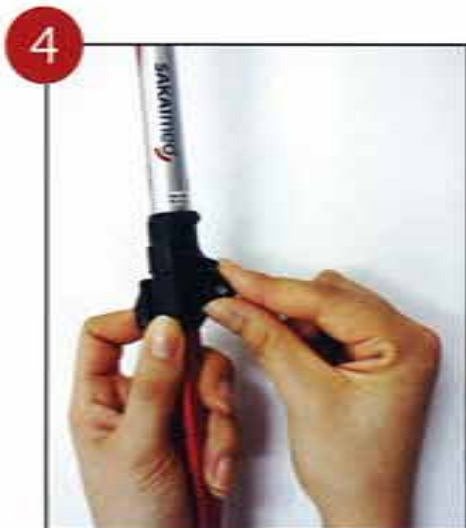

4 締め付けダイヤルを回して調整する。



5 カムレバーをロックする。「パチン」と音がすることがポイントです。




6 サイドベルトを外してウィングの右・左を確認する。



7
グリップを手の奥までにぎる。
(サイドベルトが手の甲にのる様に)



8
ベルトを軽くフィットする程度で
固定する。

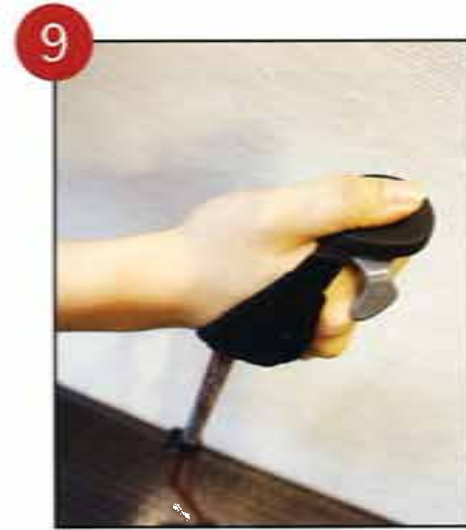

9
親指をグリップ上部にのせる。



10
先端ゴムを地面に接地してお腹の
前でコブシを合わせる。
コブシがおへその辺にすれば長さ
設定はOKです。



11
両腕を前後に振ってスムーズな動
きができるか確認する。



12
ステッキに体重をあずけて固定が
十分にできているか確認する。



13
すべて大丈夫ならステッキに歩きましょう！



第13回KOBEドリームキャッチプロジェクト
に認定されました。